



## アースライトの商品のお買い上げありがとうございます！

(テーブルについている英語の説明書の日本語訳になります)

### マッサージテーブルの使用方法

- ご使用の際はラッチを外し半分ほど開けて下さい。テーブルの後ろ側に立ち、脚を押し開くかハンドルを使いながらテーブルを開くことで脚が自動的に開きます。テーブルを直立に起してください。  
(ベッド下面のワイヤーがフレームやネジなどに絡まっていると水平に開かなかつたりしますので、ワイヤーの状態を確認の上、開いて下さい。)起した後はテーブルの片方を持ち上げケーブルが真っ直ぐになるよう調整してください。
- 各脚のグリップノブを外してお好みの高さに外脚を調整した上で再度グリップノブを締めてください。全てのグリップノブがしっかりと締められているか、高さが全て合っているかお確かめ下さい。

### マッサージテーブルのケアの方法:

- 6ヶ月おきにネジやボルトを確認し、緩んでいる場合にはしっかりと締め直してください。
- 高品質ワックスや光沢剤で木の部分をケアして下さい。風通しの良い場所で保管し、湿気の多いところはお避け下さい。
- 生地を痛める恐れがあるため、寒いあるいは暑い場所にテーブルを放置しないで下さい。テーブルを車内に放置、保管することはご遠慮下さい。生地の質を守ったまま長時間ご使用になるためにも、保管および移動にはキャリーケースをご利用下さい。また、生地の劣化やキズを防ぐため、必ずシートやパッドをご使用下さい。
- お掃除には洗剤をぬるま湯に溶かし柔らかい布に染み込ませたものを使用して下さい。汚れが残っている場合には、磨耗防止タイプのクリーナーを布に染み込ませてご使用ください。洗剤やクリーナーを使用してお掃除した後は、水拭きしてから柔らかい布で湿気を拭き取ってください。

### 保証について:

テーブルは、最初にお買い上げいただいたお客様がお使いの場合に限り、フレームで一生涯(製造中止後は5年間)の保証があります。ビニールやマットには保証はございません。但し、お客様の不注意、過失、事故、不適切な取扱い等による不具合には同保証は適応されませんのでご了承下さい。

※保証適用の可否は当社の判断によります。当社は上記の内容を事前通知なしに変更する権利を有します。

The Earthlite Massage Tables Inc.

Vista, CA, U.S.A

~~~~~

### 返品 of 取扱い

この度は弊社よりアースライト社製マッサージベッドをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

万全の注意を払い、出荷しておりますが、誤送・不良等ございましたら、お手数ですが1週間以内に下記までご連絡下さい。以後の対応はできかねますのでご了承下さい。また、事前連絡なき返品・交換はお受けできませんのでご注意下さい。

株式会社 ティー・エム・グリエーション

〒116-0001 東京都荒川区町屋 8-4-19 Tel03-3810-7050 Email info@LavenderHill-Japan.com

## アースライト社 ポータブルマッサージテーブルのご使用方法

### 【1】マッサージテーブル本体のご使用方法



マッサージテーブル本体の組み立ては簡単に出来ます！  
ドライバー等の工具は一切必要ございません。



1. 留め金を外し、テーブルを開きます。
2. ヘッドレスト等のアクセサリを取り出し、テーブルと脚を 180 度を開きます。




※ 脚にワイヤーが絡まっていないか注意して下さい。



3. ベッド本体を起こします。  
ベッドの片端を両手で持つか、ハンドルを持って起こしてください。  
このとき、足でベッド脚を固定しながら起こしましょう。




4. 安全のため、留め金は必ず閉じてください。

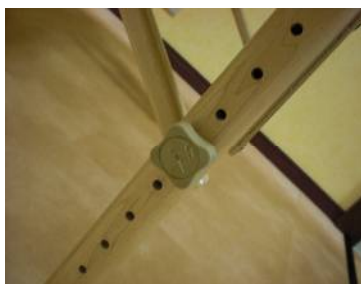

6. 高さ調節は、脚部分のノブを回し、脚を取り外して行います。  
お好みの高さに取り付け、ノブをしっかりと閉めて下さい。

ベッド本体を立ち上げ後、アクセサリ類を取り付けます。

## 【2】ヘッドレスト(デラックスアジャスタブル/フレックス/カレス)の使用方法

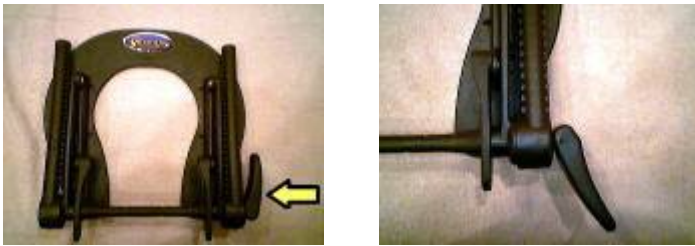

1. 上の左側の写真のように、ヘッドレストの土台を置きます。
2. 右側についているレバーを手で持ちます。  
時計の 12 時から 3 時の方向に、レバーを水平に動かします。
3. 2 本の棒をベッドの側面の穴に差し込み、角度、高さを調整して、止めたい場所でレバーを締めます。  
ヘッドレストの土台についているマジックテープと、ヘッドレストのクッションについているマジックテープとでクッションを固定し使用します。

## 【3】保証書について

アースライト社製品、インナーストレッチ製品については日本語の保証書はメーカーより用意されておりません。ベッドのマット裏側に貼ってあります製品の形式、製造年月日、各テーブル 1 台につき 1 つ付されているシリアルナンバー等が印字されているシールが保証書となります。



テーブルからは剥がさないで下さい。万一、製品に不具合があった場合には、通常の保証の開始手続きとして、製品の現物をお持ち込みいただく前に、シリアルナンバーの入ったシールの写真画像、不具合の箇所の写真をお送りいただいております。写真画像を拝見して、保証の可否を決定させていただきます。

メーカーの保証による対応となった場合には、お客様にて製品を当社までお持込下さい。当社まで製品をお持ちいただくことができない場合には、製品をしっかりと梱包して当社までお送りいただけますようお願い申し上げます。送料はすべてお客様のご負担となります。予めご了承下さい。